



NECKPAIN PRO : PARCHES PARA EL CUERPO

1. Prepare el dispositivo.



Inserte dos pilas alcalinas AAA en la parte posterior del dispositivo.



Enchufe bien el cable en la parte superior.

AVISOS IMPORTANTES:

- Revise los parches antes de usarlos. No use parches viejos, secos, sin adherencia o sin conducción.
- Siempre limpie la superficie de la piel antes del uso.
- Si siente que los parches están secos y siente una ligera picazón, cambie los parches por un par nuevo para reducir las probabilidades de tener irritación en la piel.
- Después de cada uso, siempre vuelva a pegar los parches en la película protectora.
- Cambie los parches con regularidad.
- Cambie los parches si tienen daños de cualquier tipo, por ejemplo si el cable no está bien asegurado o si el parche está doblado.
- Incluso si se usa correctamente, puede ocasionar irritación de la piel o una reacción alérgica. De ser el caso, deje de usar el dispositivo. Una crema para la piel a base de aloe puede ayudar. Si la irritación de la piel no desaparece después de unos días, comuníquese con su médico.

2. Prepare los parches para el cuerpo.



Quite la película transparente antes de adherir los parches al cuerpo.
NOTA: Vuelva a colocar la película transparente en los parches después de usarlos.




Los parches se secan con el uso. Rocíe un poco de agua o gel en ambos parches y en la piel antes de usarlos. **NOTA:** Si los parches están secos o perdieron adherencia o conducción, cámbielos antes de usarlos.



Coloque 2 parches que compartan cable en el cuerpo. Para ver cómo colocar los parches, consulte el gráfico del reverso de la página.

3. Comience el uso.

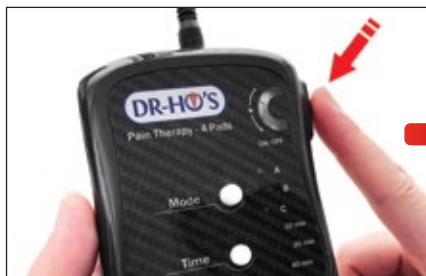

Gire el disco de intensidad hasta que haga clic para encender el dispositivo (ON). Aumente lentamente la intensidad hasta que los músculos se contraigan y se relajen. Recuéstese y relájese.



Para cambiar el modo o la duración, presione el botón correspondiente. Para continuar el tratamiento después de que se termine el tiempo programado, primero, apague el dispositivo (OFF), y luego, vuelva a encenderlo (ON).



www.a3d.cl

Teléfono: 22 327 1630

Email: a3d@a3d.cl

Facebook: A3D Chile Instagram: @a3d.cl YouTube: A3D Chile TikTok: @a3d.cl

Distribuido por: A3D Chile S.A
Avda. Eduardo Frei Montalva 6001, Edif 46
Centro Empresarial El Cortijo, Conchalí, Santiago

Rut: 96.955.880-7

Descargo de responsabilidad: Este producto DR-HO'S no está diseñado para diagnosticar, tratar ni curar ninguna enfermedad. Si usted tiene dolor o problemas de salud, debe consultar a su médico para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

Precauciones: NO use productos DR-HO'S ni ningún otro estimulador electrónico si tiene un marcapasos cardíaco o si está cursando un embarazo, debido a cuestiones de seguridad desconocidas. Si tiene preguntas o preocupaciones, consulte a su médico antes de usar el producto.

Fabricado por: Guangzhou Xinbo Electronic Co., Ltd., No. 23 Building, The Second Phase, Huachuang Animation Industry Park, Panyu, Guangzhou, Guangdong Province, 511450, República Popular China

Modelo nro. NTP (hecho en China)




UBICACIÓN DE LOS PARCHES



Molestias de cabeza, de cuello y de hombros (recuéstese durante el tratamiento)

Molestias de codo

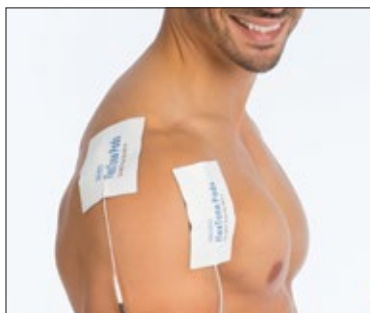


Molestias de codo

Molestias de muñeca

Molestias de mano

Molestias de cadera

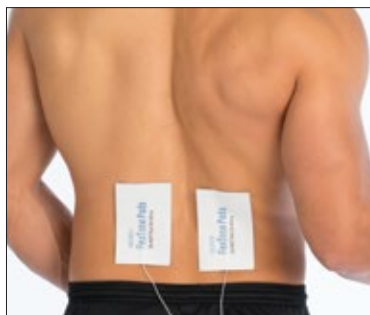

Molestias de espalda

Molestias que se extiende hasta la pierna

Molestias de muslo

Molestias de pierna



Molestias de rodilla

Molestias de espinilla

Molestias de pantorrilla

Molestias de tobillo

- Coloque los parches sobre piel limpia, seca y sana. No use los parches sobre piel seca ni en manchas, sarpullidos o heridas abiertas, ni si tiene disfunciones cutáneas.
- Coloque los parches cerca o alrededor de la zona dolorida a una distancia de alrededor de 2,5 centímetros. No permita que los parches se toquen unos con otros. Coloque el par de parches en el mismo músculo. Asegúrese de que haya una trayectoria lineal entre los dos parches.
- No comparta los parches con otra persona. No use parches viejos que haya usado otra persona; cámbielos.
- No use alcohol ni ninguna otra sustancia en la piel ni en los parches.
- Siempre asegúrese de que la piel no esté seca y de que los parches estén húmedos y pegajosos. Si los parches de gel están viejos o secos, o perdieron adherencia o conducción, cámbielos por nuevos antes del uso. Cambie los parches y no los use si experimenta una sensación incómoda de hormigueo. Si no lo hace, puede tener irritaciones en la piel.
- Incluso si se usa correctamente, el dispositivo puede ocasionar irritaciones y reacciones alérgicas pasajeras en la piel. Si tiene enrojecimiento o picazón, interrumpa su uso. Una crema para la piel a base de aloe puede ayudar. Si la irritación de la piel no desaparece después de unos días, comuníquese con su médico.
- Siempre lea y siga las instrucciones del manual del propietario para hacer un buen uso del dispositivo y de los parches.
- Si no sigue estas instrucciones, es posible que no obtenga los mejores resultados y no tenga la mejor experiencia. Entre otras cosas, podría padecer irritación y reacciones alérgicas en la piel.